

# Armstöd Top 24-35

## Installation

Montera armstödet direkt på porslinet. Du behöver inte göra någon åverkan på vägg eller golv.

Montera bort befintlig sits. Rengör porslinet. Placera vit kona i porslinets monteringshål. Läg armstödet på porslinet så att fästbultarna kan löpa genom porslinet.

För bultarna igenom sitsens fästordning, armstödsplattan och porslinet. Montera vit kona underifrån, därefter bricka och vingmutter.

OBS! Kontrollera funktionen genom att belasta armstödet.

## Skötselråd

Rengör armstödet regelbundet med tvällösning, torka efter med fuktig trasa. Vid behov använd desinficering.

Kontrollera armstödet fastsättning med jämna mellanrum.



## Materialförteckning

Metalldelar av rostfritt stål, delvis lackerade.

