

Tack för att du har valt Top Lyft.

Bruksanvisning Top Lyft

Top Lyft är anpassad för dig som behöver hjälp att sätta dig och resa dig från toaletten.

När du ska sätta dig ska sittringen vara i högt läge.
Sänk ned lyften samtidigt som du flyttar dig upp på sittringen.
Stanna i lämplig höjd så att du har stöd med fötterna.

När du ska resa dig, höjer du sittringen samtidigt som du tar dig framåt. Tanken är att du ska ha så raka ben som möjligt, när du kliver av lyften.

Sidoskydden/armstöden är vikbara. Det kan underlätta vid förflyttning.

Top Lyft manövreras upp och ned med manöverdosa eller med tryckknapparna i armstöden.



Rengöring

Vid rengöring av Top Lyft viker du upp sittringen och lyfter upp stänkkragen. Använd tvållösning eller desinficeringsmedel.



Undvik att duscha direkt på Top Lyft.

Fakta

Max belastning på sittring: 160 kg
Max belastning på sidoskydd/armstöd: 50 kg
Spänning till motor och tryckknappar: Svagström

Denna bruksanvisning har EAN nummer: 07330030740083

***Top Hygien Nordic AB, Box 484, 701 49 Örebro. Tel: 019-16 41 30. Fax: 019-16 41 49
e-post: info@topindustri.se
www.tophygien.se***