

Tack för att du har valt Top Lyft.

## Monteringsanvisning Top Lyft

1. Tag bort ev. sittring från toalettporslinet.
2. Mät avståndet mellan monteringshålerna på toalettporslinet.
3. Montera gängstängerna under lyften.
4. Lägg en transparent kona i varje monteringshål på porslinet för att lyften skall bli stadig.
5. Lyft på Top Lyft på porslinet.



6. Montera fast Top Lyft med transparenta konor, brickor och vingmuttrar.
7. Montera sidoskydd/armstöd med hjälp av medföljande skruvar, M8x30.



8. Anslut kablarna från sidoskydden/armstöden och manöverdosan till kopplingsplattan på lyftens vänstra insida.
9. Märk ut var el-boxen skall monteras.
10. Matning till Top Lyft skall alltid föregås av en 2-polig strömställare med 3 mm brytavstånd. Vi rekommenderar att även en jordfelsbrytare finns ansluten.



11. Anslut starkströmskabeln (230 v) till jordat uttag eller direkt till 2-polig strömställare.
12. Provkör lyften. Kontrollera att manöverdosan och tryckknapparna i armstöden fungerar.

Denna bruksanvisning har EAN nummer: 07330030740090

**Top Hygien Nordic AB, Box 484, 701 49 Örebro. Tel: 019-16 41 30. Fax: 019-16 41 49**  
**e-post: info@topindustri.se**  
**www.tophygien.se**