

Bruksanvisning Top Automatik

Med Top Automatik sköter du Futuras bidésits med en lätt knapptryckning



- 1 Sitt på sitsen. Om du provar funktionerna stående måste du hålla för strilmunstyckena med händerna så det inte sprutar vatten på golvet.
- 2 Starta duschningen med att trycka på startknappen. Den måste hållas intryckt i 2-3 sekunder för att starta.
- 3 Om vattnet är kallt startar förspolningen. Den duschar med lågt tryck så att vattnet ej träffar huden. När vattnet är varmt startar duscharna för fullt. Duschningen tar ca 1 minut.
- 4 Efter duschningen startar torkningen som pågår i cirka 4 minuter.

Duschningen skall ställas in efter brukarens behov. Det kan ställas så att vattnet kommer framifrån, bakifrån eller både och. Kranarna för inställningen sitter i underkant på boxen. Vattenvredet på automatikboxen skall alltid vara öppet (peka uppåt) och termostaten normalt på max. Den ger då 37 graders vatten. Termostaten är spärrad och kan aldrig ge varmare vatten. Se närmare i monteringsanvisningen. OBS! Endast fackman med behörighet får göra förändringar i installationen.

Har ni frågor eller behöver hjälp, kontakta oss gärna på Top Hygien.